

A-dec 300/400/500 牙科设备安装清单

有关更多详细信息，请参见牙科治疗椅和可选模块的安装指南。

型号	序列号	型号	序列号
牙科治疗椅:		牙科手术灯:	
牙科治疗台:		牙医助理器械:	
支撑中心:		其他:	

牙科治疗椅

- 检查在牙科手术室内的移动范围。必要时，调节治疗椅的最大高度，以免发生任何碰撞。
- 牙科治疗椅牢固地锚定在地板上。
- 治疗椅工作正常，包括治疗椅的升降、翘起以及由触控板和脚踏面板控制的可选功能。
- 验证止动开关正常启动。
- 头枕正常工作。

牙科治疗台

- 牙科手机工作正常，且已按牙医的偏好进行了设置：
 - 冷却水、冷却气及气雾。
 - 牙科手机管线冲洗。
 - 牙科手机托架阀和开关。
 - 牙科手机驱动气压。
- 弹簧式转臂（如果配备）正常工作。
- 屈臂空气制动器工作正常。
- 仅限336型：**旋转止动销已安装且工作正常。
- 仅限336型：**手动高度调节臂的高度和旋转松紧度已设定。
- 治疗台已校平。**仅限300型牙科治疗台：**将水平仪放置在托盘上进行此测量。
- 关节臂不会滑动。
- 脚控开关工作正常。

口腔灯

- 所有口腔灯设置和控件工作正常。
- 已适当调节牙科手术灯屈臂和灯头的松紧度。

牙医助理器械、痰盂和口杯注水

- 真空/抽吸强度已设为以下规格：
 - 湿态真空** - 34 ± 7 千帕（ 10 ± 2 英寸汞），最低255标准升/每分钟（9标准立方英尺/每分钟）
 - 干态/半干真空** - 16 ± 3.5 千帕（ 4.5 ± 1 英寸汞），最低340标准升/每分钟（12标准立方英尺/每分钟）
- 牙科喷枪按钮运行顺畅。
- 强力吸引装置(HVE)和排涎装置上的调节开关可自由移动。
- 口杯注水定时已正确设置。
- 痰盂水流可有效冲洗痰盂，并且能够排干痰盂。
- 仅限361、362和363：痰盂通风管末端高出支持中心框架13毫米（1/2英寸）。
- 仅限361和363：痰盂和扶手之间留有29毫米（1-1/8英寸）的间隙。

水电和气体管线

- 牙科治疗台的可调气压为552千帕（80磅/平方英寸）。
- 高级气管控制模块的可调气压需要为586千帕（85磅/平方英寸）。
- 地箱不漏气、不漏水。
- 自流排放工作正常。
- 管线和接头无扭结，且不漏气、不漏水。
- 多余的管线和电线已盘绕存放好并远离活动部件。

牙医 / 诊所:

地址:

电话:

安装日期:

经销商 / 分部:

安装者:

牙科手术室:

备注:

评审医生 / 客户:

签名

日期

医生 / 客户未检查清单



A-dec 总部

2601 Crestview Drive

Newberg, OR 97132 美国

电话 1.800.547.1883 (美国 / 加拿大境内)

电话 +1.503.538.7478 (美国 / 加拿大境外)

www.a-dec.com

A-dec Inc. 对本文件中的内容不做任何保证，包括但不限于商品适销性和针对特定目的的适用性的任何暗示保证。


a dec®
reliablecreativesolutions®



86.0248.06 Rev D
发行日期 2020-03-31
Copyright 2020 A-dec Inc.
保留所有权利。
IGrphpor18