

Kontrolní seznam pro údržbu vybavení A-dec®

Po ošetření každého pacienta

- Vyčistěte, namažte a sterilizujte násadce
- Vyčistěte špičky pistolí pomocí ultrazvuku a poté proveďte jejich sterilizaci
- Otřete a propláchněte hadičku násadce
- V případě postupů ústní chirurgie propláchněte podtlakové vedení
- Vyčistěte / vydezinfikujte dotykové a přenosové povrchy
- Vyměňte všechny bariéry

Denně / podle potřeby

- Při každém naplnění láhve vodou přidejte tabletu A-dec ICX®† (viz čísla součástí v Tabulce 3)
- Oplachujte plivátka po dobu jedné minuty
- Vyčistěte misku plivátka a sítko misky
- Propláchněte podtlaková vedení za použití přípravku A-dec určeného k čištění odsávacích zařízení † (viz čísla součástí v Tabulce 3)

Týdně / podle potřeby

Datum

- Vyčistěte čalounění křesla a sedáku pomocí slabého kapalného přípravku k mytí nádobí a vody
- Vyčistěte ventily vysokovýkonného odsávače a odsávačky slin
- Dvakrát týdně proveďte kontrolu a údržbu lapače pevných částic
- Proveďte údržbu sběrače oleje
- Namažte sklíčidla násadců
- Ověřte plynulé otáčení frézky v násadci
- Očistěte kryt operačního světla pomocí slabého kapalného přípravku k mytí nádobí a vody
- Pokud je to možné, vyměňte bariéru operačního světla Medicom® SafeShield™

Datum

Měsíčně

- Přezkoušejte hladinu CFU ve vodě stomatologické jednotky a proveďte nárazové ošetření rozvodů vody pomocí přípravku A-dec ICX Renew® nebo Restore® (viz čísla součástí v Tabulce 3)
- Zkontrolujte všechny násadce, motory a O-kroužky; jsou-li opotřebené / poškozené, proveďte jejich výměnu
- Namažte O-kroužky láhve na vodu, vysokovýkonného odsávání a odsávačky slin

Ročně

Datum

- Obraťte na místního autorizovaného prodejce společnosti A-dec s požadavkem na provedení instalace soupravy roční preventivní údržby (viz čísla součástí v Tabulce 1)
- Vyměňte všechny O-kroužky nástavců a motorů (viz čísla součástí v Tabulce 2)

*Podrobný popis postupu údržby naleznete v *návodu k použití* dodaném s vybavením, případně navštivte stránky Centra zdrojů společnosti A-dec na adrese www.a-dec.com/resource-center.

†Podrobné pokyny týkající se údržby rozvodů vody naleznete v *Příručce k údržbě rozvodů vody* (číslo součásti 85.0983.11) dodané s vybavením, případně navštivte stránky Centra zdrojů společnosti A-dec na adrese www.a-dec.com/resource-center.

Stomatologické vybavení A-dec je konstruováno tak, aby poskytovalo co nejdélejší životnost. Pravidelně plánované kontroly a výměny součástí zajistí výkon, na který se můžete spolehnout.

Tabulka 1: Součásti a soupravy pro údržbu vybavení A-dec

Položka	Číslo součásti
Silikonový lubrikant (tuba o objemu 5,3 oz)	98.1120.00
Sítkový odlučovač (A-dec 300/500), balení po 10 ks	11.1284.01
Špičky pistole, balení po 5 ks	23.0872.01
Souprava roční preventivní údržby A-dec 500/300	90.1835.00
Souprava roční preventivní údržby Performer®/Cascade®/200	90.1836.00
Souprava preventivní údržby prováděné po 5 letech A-dec 500B	90.1870.00
Souprava preventivní údržby prováděné po 5 letech A-dec 500A Surf (V2)	90.1874.00
Souprava preventivní údržby prováděné po 5 letech A-dec 500A Surf (V1)	90.1873.00
Souprava preventivní údržby prováděné po 5 letech A-dec 500A White/A-dec 300 (V2)	90.1872.00
Souprava preventivní údržby prováděné po 5 letech A-dec 500A White/A-dec 300 (v1)	90.1871.00
Souprava preventivní údržby prováděné po 5 letech Cascade/Decade®/Performer	90.1875.00
Souprava preventivní údržby prováděné po 5 letech A-dec 200/Performer B (V1)	90.1876.00
Souprava preventivní údržby prováděné po 5 letech A-dec 200/Performer B (V2)	90.1877.00

Tabulka 2: O-kroužky pro elektromotor A-dec 501

Položka	Číslo součásti
O-kroužek, vložka motoru, modrý	54.0803.00
O-kroužek, vložka motoru, černý	54.0804.00
O-kroužek, připojení hadičky motoru	54.0805.00

Tabulka 3: Produkty řady A-dec 360 doporučené pro údržbu rozvodů vody stomatologické jednotky (DUWL) a odsávacích systémů

Použití	Položka	Číslo součásti
Odsávací systém	Prostředek k čištění odsávacích systémů, láhev 33 oz	91.0060.01
Odsávací systém	Prostředek k čištění odsávacích systémů, láhev 128 oz	91.0061.01
Denní údržba DUWL	Tablety ICX pro čištění rozvodů vody, 0,7 l (50 kusů)	91.1064.01
Denní údržba DUWL	Tablety ICX pro čištění rozvodů vody, 2 l (50 kusů)	90.1065.01
Rázové čištění DUWL	ICX Renew, krabice pro 9 aplikací	90.1691.01
Rázové čištění DUWL	ICX Restore, krabice pro 9 aplikací (pouze Kanada)	90.1821.01

Informace o dalším volitelném příslušenství a dalších možnostech výměny součástí vám poskytne autorizovaný prodejce společnosti A-dec.

