

A-dec 200牙科治疗椅和模块安装清单

有关更多详细信息，请参见牙科治疗椅和可选模块的安装指南。

	型号	装运编号	型号	装运编号
治疗椅：	A-dec 200		手术灯：	
牙科治疗台：			牙医助理器械：	A-dec 200
支撑中心：	A-dec 200		其他：	

牙科治疗椅

- 牙科治疗椅牢固地锚定在地板上
- 治疗椅工作正常，包括治疗椅的升降、倾斜以及由触控板和脚踏面板控制的可选功能
- 头枕工作正常
- 扶手工作正常
- 止动板工作正常

牙科治疗台

- 牙科手机工作正常，并且已按牙医的偏好进行了设置：
 - 冷却水、冷却气及气雾
 - 牙科手机软管冲洗
 - 牙科手机挂架阀和开关
 - 牙科手机驱动气压
- 屈臂承重正常
- 屈臂档位松紧度已正确设置
- 屈臂旋转止动销已安装
- 治疗台与治疗台顶部保持水平
- 关节臂不会滑动
- 脚踏开关工作正常

牙科手术灯

- 所有手术灯设置和控件工作正常
- 屈臂和灯头的松紧度已调节妥当
- 屈臂旋转止动销已安装

牙医助理器械、痰盂和口杯注水

- 真空/抽吸强度已设为以下规格：
 - 湿态真空 - 34 ± 7 千帕（ 10 ± 2 英寸贡），最低255标准升/每分钟（9标准立方英尺/每分钟）
 - 干态/半干真空 - 16 ± 3.5 千帕（ 4.5 ± 1 英寸贡），最低340标准升/每分钟（12标准立方英尺/每分钟）
- 喷枪按钮运作顺畅
- 强力吸引装置(HVE)和排涎装置上的调节开关可自由移动
- 口杯注水时间已正确设置
- 痰盂水流可有效冲洗痰盂，并且能够排干痰盂

水电和气体管线

- 可调气压为552千帕（80磅/平方英寸）
- 地箱不漏气、不漏水
- 自流排放工作正常
- 软管和接头无扭结，且不漏气、不漏水
- 多余的软管和电线已盘绕存放好并远离活动部件

牙医/诊所：

地址：

电话：

安装日期：

经销商/分部：

安装者：

牙科手术室：

备注：

评审医生/客户：

签名

日期

医生/客户未检查清单



A-dec总部

2601 Crestview Drive

Newberg, OR 97132 美国

电话：1.800.547.1883 (美国/加拿大境内)

电话：1.503.538.7478 (美国/加拿大境外)

传真：1.503.538.0276

www.a-dec.com

A-dec Inc.对本文件中的内容不做任何保证，该保证包括但不限于商品适销性和对某项特殊目的的适用性的隐含保证。


a dec[®]
reliablecreativesolutions™

86.0656.06 Rev B
发行日期 2020-03-25
2020 A-dec Inc. 版权所有
保留所有权利。
IGgphpor11