

A-dec Performer牙科治疗椅和模块安装清单

有关更多详细信息，请参见牙科治疗椅和可选模块的安装指南。

	型号	装运编号	型号	装运编号
治疗椅：	Performer		口腔灯：	
牙科治疗台：	Performer		牙医助理器械：	Performer
支撑中心：	Performer		其他：	

牙科治疗椅

- 牙科治疗椅牢固地锚定在地板上
- 治疗椅工作正常，包括治疗椅的升降、倾斜以及由触控板和脚踏面板控制的可设置功能
- 头枕工作正常
- 止动板工作正常

牙科治疗台

- 牙科手机工作正常，并且已按牙医的偏好进行了设置：
 - 冷却水、冷却气及气雾
 - 牙科手机软管冲洗
 - 牙科手机挂架阀和开关
 - 牙科手机驱动气压
- 旋转止动销已安装且工作正常
- 牙科治疗台的高度和旋转松紧度已调节妥当
- 治疗台与托盘保持水平
- 治疗台旋转松紧度已调节妥当
- 关节臂不会滑动
- 脚踏开关工作正常

口腔灯

- 所有口腔灯设置和控件工作正常
- 口腔灯灯臂和灯头的松紧度已调节妥当

牙医助理器械、痰盂和口杯注水

- 真空/抽吸强度已设为以下规格：
 - 湿态真空 - 34 ± 7 千帕 (10 ± 2 英寸贡)，最低255标准升/每分钟 (9标准立方英尺/每分钟)
 - 干态/半干真空 - 16 ± 3.5 千帕 (4.5 ± 1 英寸贡)，最低340标准升/每分钟 (12标准立方英尺/每分钟)
- 喷枪按钮运作顺畅
- 强力吸引装置(HVE)和排涎装置上的调节开关可自由移动
- 口杯注水时间已正确设置
- 痰盂水流模式可有效冲洗痰盂，并可正确排干痰盂

水电和气体管线

- 可调气压为552千帕（80磅/平方英寸）
- 地箱不漏气、不漏水
- 自流排放工作正常
- 软管和接头无扭结，且不漏气、不漏水
- 多余的软管和电线已盘绕存放好并远离活动部件

牙医/诊所：

地址：

电话：

安装日期：

经销商/分部：

安装者：

牙科手术室：

备注：

评审医生/客户：

签名

日期

医生/客户未检查清单



A-dec总部

2601 Crestview Drive

Newberg, OR 97132 美国

电话：1.800.547.1883（美国/加拿大境内）

电话：+1.503.538.7478（美国/加拿大境外）

传真：+1.503.538.0276

www.a-dec.com

A-dec Inc.对本文件中的内容不做任何保证，
该保证包括但不限于商品适销性和对某项特
殊目的的适用性的隐含保证。



86.0657.06 Rev C
发行日期 2020-03-25
2020 A-dec Inc. 公司版权所有
保留所有权利。
IGgphpor11